



Система ІРС®

ІНТЕГРОВАНА КОНСОЛЬ ЖИВЛЕННЯ



Інновації, що вносять суттєві зміни

Згідно з побажаннями хірургів та медичних сестер, що працюють в галузі

Інтегрована консоль живлення – ЄДИНА силова система в сфері отоларингології, що пропонує:

- Найширший асортимент спеціалізованих продуктів
- Дистанційний контроль іригації IntelliFlow®
- Іригацію зі швидкістю 0,5 мл/хв при роботі в лицьовому кармані
- Інтегрований моніторинг лицьового нерву при роботі з отологічним дрилем Visao® за допомогою насадки Stim Bur Guard*
- Високошвидкісні спеціалізовані вигнуті бори для проведення отологічних процедур
- Комплексне рішення для хірургічних операцій на передньому відділі основи черепа

*Для використання разом з системами нейромоніторингу NIM® 2.0 і 3.0 компанії Medtronic

Інтегрована силова консоль (IPC®)

Інновації, що вносять суттєві зміни

Інтегрована силова консоль пропонує інноваційні рішення, що повністю змінюють вашу операційну систему. Систему було розроблено згідно з побажаннями, які надходили від вас, хірургів і медичних сестер, що працюють в цій сфері. Наша IPC® система – єдина силова консоль для операцій на ЛОР-органах, яка комплектується найширшою лінійкою спеціалізованих інструментів. Від нижньої турбинопластики до комплексних операцій на основі черепа – платформа IPC є вашим універсальним помічником при виконанні всіх видів операцій на ЛОР-органах.



*Для використання разом з системами нейромоніторингу NIM® 2.0 і 3.0 компанії Medtronic

Повна інтеграція

Забезпечення живлення ваших улюблених ЛОР-насадок Medtronic

- Мікродебрідера Straightshot® M4
- Системи очищення лінз Endo-Scrub® 2
- Отологічного дреля Skeeter®
- Високошвидкісного отологічного дреля Visao®
- Високошвидкісного отологічного дреля Indigo®



Straightshot® M4

Контроль і точна резекція м'яких тканин

- Покращення якості огляду завдяки вбудованій системі відкачки крові та органічних залишків
- Широкий асортимент спеціалізованих лез і борів
- Ручне управління дозволяє обертати наконечник леза на 360°
- Відкалібровані виробником леза для ЕМ-навігації за допомогою Straightshot M4 і системи ЛОР-навігації Fusion
- Зменшення забруднення лез¹ і підвищення точності² при застосуванні лез Quadcut



Втручання на передній основі черепа

Комплексне рішення для виняткової візуалізації

- Вигнуті бори й леза забезпечують кращий огляд і доступ
- Вбудована система відсмоктування дозволяє підтримувати чистоту операційного поля

Платформа ІРС – ЄДИНА ЛОР-система живлення, що має такий широкий діапазон спеціалізованих інструментів

Література

1. Boone JL, Feldt BA, McMains KC, Weitzel EK. Improved function of prototype 4.3-mm Medtronic Quadcut microdebrider blade over standard 4.0-mm Medtronic Tricut microdebrider blade. *Int Forum Allergy Rhinol*, 2011; 1:198-200.
2. Internal verification study.

Indigo™

Високошвидкісний отологічний дріль

- Висока швидкість та достатній крутний момент для швидкого видалення тканин
- Випускається з прямими та кутовими наконечниками
- Кращий оперативний доступ і огляд в обмежених ділянках, характерних для отології
- Працює з широким спектром отологічних борів Medtronic Xomed
- Канавки на передній частині наконечника забезпечують більш стабільну іригацію



Насадка Stim Bur Guard для отологічного дреля Visao®

Інтегрований моніторинг лицьового нерву

- Попередження про наближення до лицьового нерву за 1-3 мм
- Зменшує ризик ушкодження пацієнта завдяки зростанню впевненості хірурга в своїх діях
- Працює з системою інтраопераційного нейромоніторингу* NIM®



Багатофункціональна педаль

Ергономічний контроль за допомогою ніг

- Три кнопки забезпечують максимальне управління
- Вбудовані упори та ергономічний кут нахилу для зручності
- Обід надійно утримується на місці та легко складається для зберігання
- Конструкція з попередженням ковзання та компактний розмір ідеально підходять для вашої операційної



*Для використання разом з системами нейромоніторингу NIM® 2.0 і 3.0 компанії Medtronic

Інформація для замовлення

Комплектуючі до системи IPC® та Endo-Scrub® 2

Продукт	Опис	Кількість
1898001	Інтегрована консоль живлення (IPC)	1
1898430	Багатофункціональна педаль інтегрованої консолі живлення	1
1897510	Корзина	1
1852000	Ножний перемикач Endo-Scrub 2	1
1991015	Ручний перемикач Endo-Scrub 2	1

Кабелі живлення для системи IPC®

Продукт	Опис	Кількість
1895820	Силовий кабель, стандартний, Півн.Америка 3 м	1
1895821	Силовий кабель, стандартний, Півн.Америка 6 м	1
1895824	Силовий кабель, Великобританія/Ірландія, 6 м	1
1895825	Силовий кабель, Континентальна Європа, 6 м	1
1895823	Силовий кабель, Японія	1

Керівництво з системи IPC®

Продукт	Опис	Кількість
1898852	Керівництво з IPC (тільки англ.)	1
1898851A	Керівництво з IPC (EL, EN, ES, FR, PT)	1
1898851B	Керівництво з IPC (DE, EN, FR, IL, NL)	1
1898851C	Керівництво з IPC (DA, EN, FI, NO, SV)	1
1898851D	Керівництво з IPC (CS, EN, HU, PL, RU, TR)	1
1898851E	Керівництво з IPC (EN, RU) – тільки CD	1

Комплектуючі до мікродобрідера Straightshot® M4

Продукт	Опис	Кількість
---------	------	-----------

Компоненти високошвидкісного отологічного дрілья Visao®

Продукт	Опис	Кількість
3334800	Високошвидкісний отологічний дріль Visao	1
3334625	Високошвидкісний отологічний дріль Visao Розширений захист бора без іригації	1
3334635	Високошвидкісний отологічний дріль Visao Розширений захист бора з іригацією	1
3334898	Високошвидкісний отологічний дріль Visao Лоток для інструментів	1
3155617	Щітка для бора	1
3112500	Зажимна щітка для очищення Micro-Craft	60
3318603	Трубка для зрошення Visao з дистанційним контролем IntelliFlow®	1
3318605	Набір перехідників для відсмоктування/іригації	5
3318606	Трубка для охолоджуючої рідини Visao	2
3318601	Stim Bur Guard з іригацією	1
3318602	Stim Bur Guard без іригації	1

Комплектуючі для Skeeter®

Продукт	Опис	Кількість
3055601	Надлегка насадка Skeeter	1
3155615	Лоток для інструментів Skeeter	1
3052460	Отологічна метрична шкала Skeeter	1
3155641	Бор Oto-Flex для Skeeter, Оранжевий/білий, алмазний, 1 мм	1
3155631	Бор Oto-Flex для Skeeter, Оранжевий, карбідний, 1 мм	1
3155647	Бор Oto-Flex для Skeeter,	1

1898200T	XPS® Straightshot® M4 високошвидкісний мікробридер	1	3155632	Зелений/білий, алмазний, 0,7 мм Бор Oto-Flex для Skeeter, Червоний, карбідний, 2,3 мм	1
1898400	Лоток для інструментів для XPS Straightshot M4	1	3155648	Бор Oto-Flex для Skeeter, Жовтий/білий, алмазний, 0,8 мм	1
			3155642	Бор Oto-Flex для Skeeter, червоний/білий, алмазний, 2,3 мм	1
			3155646	Бор Oto-Flex для Skeeter, синій/білий, алмазний, 0,6 мм	1
			3155643	Бор Oto-Flex для Skeeter, сірий/білий, алмазний, 1,4 мм	1
			3155645	Бор Oto-Flex для Skeeter, коричневий/білий, алмазний, 1,8 мм	1
			3155635	Бор Oto-Flex для Skeeter, фіолетовий, карбідний, 0,5 мм	1
Комплектуючі для Indigo™					
Продукт		Опис		Кількість	
1845000	Високошвидкісний	отологічний дріль Indigo		1	
1845010	Отологічна пряма насадка	для Indigo		1	
1845020	Отологічна вигнута	насадка для Indigo		1	
1845040	Лоток для інструментів	Indigo		1	
1845030	Трубки для Indigo			5	