

Витратні матеріали для роботи на автоматичних біохімічних аналізаторах серії FLEXOR / SELECTRA

6002-706 Комплект кюветних роторів (3 шт)




Кюветний ротор на 48 лунок. Виконує функцію ємності для зчитування абсорбції лунки в якій знаходиться вимірювальна суміш (зразок). Потребує періодичної заміни в автоматичному біохімічному аналізаторі Flexor/Selectra. Виготовлений з оптично – прозорого полістиролу.
Форма пакування – упаковка 3 шт.

Застереження: ротор при заміні потрібно брати за тримач зверху, ні в якому разі не торкатись зовнішньої та внутрішньої бокових стінок.



6002-828 Набір педіатричних адаптерів (10 шт)

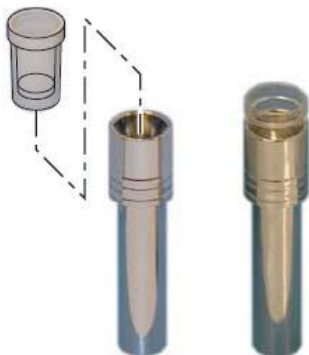

Спеціалізований адаптер для ємностей на 2 мл до автоматичного біохімічного аналізатора Flexor/Selectra. Вид пакування – упаковка 10 шт. Застосування – вставте ємність для зразка в педіатричний срібний адаптер. Педіатричний адаптер тепер може, бути завантажений так само, як звичайні пробірки.

3062-021 Чашечка для зразків 2 мл (1000 шт)



Спеціалізована ємність до автоматичного біохімічного аналізатора Flexor/Selectra. Використовується для утримання зразка (біологічного матеріалу) об'ємом 0,2 - 2 мл в аналізаторі.

Матеріал - полістирол. Вид пакування – упаковка 1000 шт

3062-033 Пробірка для зразків 6 мл (500 шт)



Спеціалізована пробірка до автоматичного біохімічного аналізатора Flexor/Selectra.

Використовується для утримання зразка (біологічного матеріалу) об'ємом 1 - 6 мл в аналізаторі.

Параметри пробірки: 13 x 75 мм, матеріал - полістирол.

Вид пакування – упаковка 500 шт.

3062-031 Реагентний флакон 25 мл (30 шт)



Спеціалізовані ємності для реагенту об'ємом 25 мл, що використовуються в процесі роботи автоматичного аналізатора для клінічної хімії. Встановлюються в реагентний ротор аналізатора у лунку відповідного розміру.

Вид пакування – упаковка 30 шт.


3062-042 Реагентний флакон 10 мл з кришкою



Спеціалізовані ємності для реагенту об'ємом 10 мл, що використовуються в процесі роботи автоматичного аналізатора для клінічної хімії. Встановлюються в реагентний ротор аналізатора у лунку відповідного розміру.

Вид пакування – упаковка 10 шт.

6001-963 Фільтрувальний блок в зборі

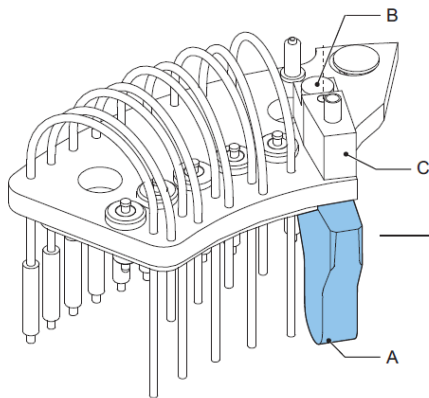

Використовується в автоматичному аналізаторі для клінічної хімії. Конструкція блоку виготовлена з пористого матеріалу, яка повторює форму лунки для якісного висушування від залишкової рідини вимірювальних кювет.

Потребує заміни в аналізаторі два рази на рік.

Виробник:

ELITechGroup B.V.
Van Rensselaerweg 4,
6956 AV Spankeren,
The Netherlands

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Трансмед»
Україна, 01103, м. Київ,
вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 26
Тел./факс: (+38 044) 236-98-45
Email: office@transmed.com.ua